

CFPM
www.rs-dental-products.com

Description :

Turbocclusion R&S est un excellent silicone par addition à prise rapide pour l'enregistrement de l'occlusion. Le temps de travail est de 30 secondes et le temps de prise d'une minute à partir du début de mélange. Le kit comprend deux cartouches automix de 50 ml et douze embouts mélangeurs.

Turbocclusion R&S a été utilisé par 24 consultants dans le cadre de 341 applications cliniques.

Ce produit a reçu **96% d'avis cliniques favorables**.

96%
d'avis
favorable


« J'AI EU MOINS D'AJUSTEMENTS
À FAIRE AVEC LES
ENREGISTREMENTS D'OCCLUSION
TURBOCCLUSION R&S. »

Commentaires des consultants


- « Un matériau très dur, rigide et précis. »
- « Une distribution uniforme, sans gaspillage. »
- « Les patients apprécient la rapidité de prise. »
- « Il faut exercer une pression importante pour sortir le produit de la cartouche. »



Comparaison avec
des produits concurrents :

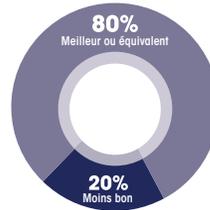

Pourcentage de consultants qui :

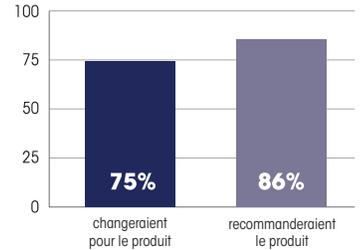

Caractéristiques uniques

Turbocclusion R&S a été évalué très bon à excellent pour la facilité de distribution et d'application, la viscosité, la facilité de retrait et les détails d'empreinte. Le matériau s'écoule uniformément sur la surface des dents et présente une bonne tenue au niveau des préparations. Les enregistrements d'occlusion obtenus présentent des détails précis et peuvent être ajustés avec des pierres à polir ou des fraises acryliques. 80% des consultants ont évalué **Turbocclusion R&S** comme équivalent ou meilleur que le matériau d'enregistrement d'occlusion qu'ils utilisent actuellement. 75% des consultants seraient prêts à acheter le produit et 86% à le recommander.